

راهنمای استفاده از الکتروشوک Philips

ابتدا انرژی مورد نظر را انتخاب کرده پدالها را روی قفسه سینه طبق پروتکل مرکز قرار داده و میزان تماس پدالها با بدن از روی چراغ نشانگر روی پدال استرنوم بررسی شود دکمه شارژ روی پدالها را فشار دهید و با تغییر صدای بوق دستگاه کلیدهای تخلیه شوک روی پدالها را فشار دهید.

پاسخ به آلام ها :

وضعیت بیمار را بررسی کنید

هشدار مشاهده شده را بررسی کنید

با فشار دادن کلید منو یا یکی از کلیدهای هدایتی هشدار را بی صدا کنید

با انتخاب یکی از گزینه های زیر هشدار را مشخص کنید:

Alarms off: آلام ها پارامترهای مانیتورینگ به طور دائم خاموش شده و علامت Δ در کنار مقدار پارامتر نشان داده می شود.

Acknowledge: تایید اینکه شرایط هشدار وجود دارد بدون اینکه عمل اضافه ای انجام شود بصورت پیش فرض وقتی که هشدار بوجود آید همیشه پیغام Acknowledge ظاهر می شود.

Newlimits: محدوده آلام پارامترها را تنظیم کنید.

بررسی و تنظیم محدوده آلام ها

محدوده آلام ها بر اساس نوع بیمار و تنظیمات دستگاه به طور پیش فرض تعیین شده اند. زمانیکه آلام ها روشن هستند محدوده آلام ها کنار مقدار پارامتر اندازه گیر قابل مشاهده می باشد.

برای تنظیم محدوده آلام ها

دکمه منو را بزنید

گزینه Measurements/Alarms را انتخاب کرده و دکمه منو را بزنید.

پارامتر مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه منو را بزنید

Limits را از منو انتخاب کرده و دکمه منو را بزنید

محدوده مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه منو را بزنید.

نشانگر آماده به کار

نشانگر آماده به کار rfu درست راست وبا دستگاه قرار دارد این نشانگر با استفاده از علامتها زیر وضعیت عملکرد مانیتور -
دفیبریلاتور را نشان میدهد

ساعت شنی مشکی چشمک زن □ نشان می دهد که عملکردها شوک ضربان ساز ودستگاه آماده به کار میباشد میزان شارژ باتری مناسب برای عملکرد دستگاه وجود دارد

علامت ☒ قرمز چشمک زن با صدای بوق منقطع نشان میدهد که باتری داخل دستگاه نمی باشد یا وضعیت شارژ باتری در سطح پایینی می باشد چنانچه باتری داخل دستگاه قرار گرفته و شارژ شود صدای بوق قطع می شود

علامت ☒ قرمز ثابت با صدای بوق منقطع نشان میدهد که یک اشکال حساس و اساسی در دستگاه تشخیص داده شده است که ممکن است از اعمال شوک در دفیبریلاسیون ، ضربان ساز و ثبت سیگنال جلوگیری کند. هنگام روشن کردن دستگاه یک پیغام خطا نمایش داده می شود.

علامت ☒ قرمز ثابت بدون صدا بوق منتقطع نشان می دهدکه هیچ منبع تغذیه ای به دستگاه متصل نمی باشد یا یک خطا رد دستگاه رخ داده است.رد صورتیکه عد از اتصال برق یا باتری نشانگر به حالت ساعت شنی مشکی چشمک زن بازگردد دستگاه آماده استفاده می باشد.

- پدلها را در حالت چسبیده به یکدیگر تخلیه نکنید.
- پدلها را پس از هر بار استفاده با پارچه نمدار تمیز نمایید.
- دقت شود الکترودهای داخلی باید بعد از هر بار استفاده استریل شوند.
- هنگام کار با دستگاه هیچگاه نباید دست و یا پدلها مرطوب باشند زیرا احتمال برق گرفتگی وجود دارد.
- هنگام استفاده از مواد شوینده مراقب باشید این مواد و سایر مایعات در داخل دستگاه و همچنین ورودی تجهیزات جانبی وارد نشود.
- برای ضد عفونی کردن استفاده از الکل ۷۰٪ به همراه مواد پاک کننده با درجه بیمارستانی مناسب می باشد.
- هنگام تعویض پدلها و پروب ها باید حتما دستگاه خاموش باشد.