

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

تجهیزات پزشکی مرکز بهداشت زرنند

دستورالعمل استفاده و نگهداری از دستگاه ساکشن

دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه را حتما! قبل از استفاده آن مطالعه نمایید.

نکات مهم

- ۱- لازم است در ابتدا جهت اطمینان از صحت عملکرد دستگاه، پس از اتصال لوازم جانبی دستگاه، ورودی شلنگ بیمار را مسدود کرده و مقدار فشار روی گیج را کنترل نمایید که فشار بیش از ۶۰ kpa مورد قبول می‌باشد.
- ۲- سپس مقدار و کیوم مورد نیاز را تنظیم و بعد مورد استفاده قرار دهید.
- ۴- هنگامی که مایعات در ظرف جمع آوری به علامت ماکزیمم رسید دستگاه را خاموش کرده و کانکشن ظرف را بروی ظرف دیگر انتقال دهید.
- ۵- ظرف سرریز همواره بعنوان یک وسیله حفاظتی برای جلوگیری از ورود مایعات به موتور دستگاه می‌باشد نباید هیچگونه محلول یا خونابه در آن وارد گردد.
- ۶- فیلتر باکتری مورد استفاده در دستگاه یکبار مصرف می‌باشد پس از ایجاد مقاومت بیش از ۱۰ kpa و یا پاره شدن و یا نفوذ مایعات تعویض گردد.
- ۷- عدم استفاده از فیلتر باکتری باعث ایجاد آلودگی های محیطی و انتشار بیماریها می‌شود.
- ۸- لوله‌های یکبار مصرف سیلیکون بهترین حالت جهت استفاده از ساکشن می‌باشد که باید برای هر بیمار تعویض گردد.
- ۹- عدم تنظیم صحیح (رگولاتور تنظیم و کیوم بیش از حد مورد نیاز) باعث بروز آسیب جدی برای بیمار می‌شود.
- ۱۰- در صورت شنیدن صدای غیر عادی دستگاه را خاموش کرده و به مسئول مربوطه اطلاع دهید. اقدامات لازم جهت شستشوی دستگاه:
- ۱- جهت تمیز و ضدعفونی کردن، دستگاه را از برق شهر جدا کنید.
- ۲- ظرف جمع آوری مایع بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده، بایستی بطور روزانه تخلیه و تمیز شده و به صورت خشک نگهداری گردد.
- ۳- ظرف جمع آوری مایع و سرریز و در صورت نیاز شلنگ‌های مربوطه به همراه شیرهای قطع کن را ابتدا با مواد شوینده تمیز کرده و سپس با مواد ضد عفونی مورد تأیید اداره کل غذا داروی کشور ضد عفونی نمایید بدیهی این ظروف جزء وسایل و غیر بحرانی تلقی می‌شوند.
- ۴- کلیه مراحل شستشو و ضد عفونی باید زیر نظر مسئول کنترل عفونت انجام شود.