

# دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

تجهیزات پزشکی مرکز بهداشت زرنند

## راهنمای استفاده از دستگاه سونی کید فنون طب

### PM دستگاه:

- از استریل کردن در دما و فشار بالا و استفاده از اشعه جهت استریل خودداری نمایید.
- از وارد شدن آب بداخل دستگاه هنگام تمیزکاری جلوگیری شود.
- ژلهای اضافی موجود در سطح پروب را با پارچه نرم پاک کنید. می توانید از الکل ۷۰٪ جهت تمیز کردن پروب استفاده کنید.

### نحوه استفاده از دستگاه:

۱. کلیدهای خاموش و روشن: در صورتیکه کلید اصلی تغذیه دستگاه روشن باشد با فشار دادن کلید ON دستگاه روشن و با فشار دادن کلید OOF دستگاه خاموش می شود.
۲. کلید های تنظیم صدا: کلید UP برای زیاد نمودن صدا و کلید DOWN برای کم کردن آن بکار می رود.
۳. نمایشگر حجم صدا: نشان دهنده حجم صدای تنظیم شده است. در صورتیکه تمام چراغها روشن باشند صدا در بیشترین مقدار و در صورتیکه فقط یک چراغ روشن باشد کمترین مقدار صدا انتخاب شده است. تنظیم حجم صدا به کمک کلیدهای تنظیم صدا (۲) انجام می گیرد و در مدل D500 در این قسمت تعداد ضربان قلب بر روی LCD نمایش داده میشود.
۴. سوکت پروب: محل اتصال فیش پروب به دستگاه است.
۵. محل اتصال گوشی: برای اتصال گوشی یا ضبط صوت بکار می رود.
۶. کلید فیلتر: برای گرفتن نویز اضافی دستگاه
۷. جا پروبی: محل قرار گرفتن پروب دستگاه
۸. نشانگر اتصال به برق شهر: در صورت اتصال دستگاه به برق شهر این چراغ روشن میشود.
۹. نشانگر روشن و خاموش: با فشار دادن کلید روشن و خاموش (۱) این نمایش گر وضعیت روشن و خاموش بودن دستگاه را نمایش میدهد
۱۰. نشانگر وضعیت باتری: سبز بودن این نشانگر به معنی شارژ کامل و قرمز بودن آن کم بودن شارژ باتری را نمایش میدهد.