

# دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تجهیزات پزشکی مرکز بهداشت زرنند

## راهنمای استفاده از دستگاه اندازه گیری فشار خون عقربه ای

۱. از وارد آمدن ضربه و افتادن دستگاه روی زمین به طور جدی پیشگیری شود
۲. برای پاک کردن و نظافت دستگاه از الکل اسفاده نشود
۳. از تحت کشش قرار گرفتن لوله های دستگاه و پیچ خوردگی آنها جلوگیری شود
۴. از باز کردن قطعات مانومتر و دستکاری آن بطور جدی خودداری شود

## راهنمای استفاده از دستگاه گلوکومتر

۱. همیشه از نوارهای جدیدی که برای استفاده در دستگاه شما ساخته شده استفاده کنید. هر نوار تست را تنها یکبار میتوان استفاده نمود.
۲. مطمئن شوید که دمای توصیه شده توسط سازنده دستگاه را حین گرفتن تست قند خون رعایت می کنید.
۳. استفاده از نوارهای قدیمی یا انجام تست قندخون در شرایط بسیار سرد یا گرم می تواند در دستگاه شما خطا ایجاد کند.
۴. با احتیاط از گلوکومتر استفاده کنید زمین انداختن یا پرتاب کردن دستگاه به آن آسیب میرساند .
۵. دستگاه اندازه گیری قندخون و نوارهای تست ومحلول کنترل را در شرایط خاص نظیر رطوبت و دمای بالا ویا خیلی پایین وگردغبار قرار ندهید.
۶. پیش از استفاده از دستگاه قندخون ونوارهای تست دست های خود را با آب وصابون به خوبی شسته و خشک کنید.