

قبل از استفاده به نکات زیر توجه نمایید:

- (۱) رعایت فاصله حداقل دو متر از آتش ضروری است. زیرا اکسیژن باعث احتراق و سوختگی می شود.
- (۲) مواد آتش زا را از کپسول دور نمایید.
- (۳) برای استفاده در محیط نیاز به تهویه کافی است، زیرا با تجمع اکسیژن خطر انفجار وجود دارد.
- (۴) از به کار بردن روغن، گریس و یا هر ماده چرب در نزدیکی کپسول اکسیژن خودداری نمایید.



طریقه استفاده:

- (۱) کپسول اکسیژن را پس از پر کردن حتما در تالی یا جای مخصوص قرار دهید، سپس مانومتر را به آن وصل کرده و در صورت داشتن نشتی از واشر استفاده کنید.
- (۲) شیشه آب مقطر را تا خط نشانه (حداکثر دو سوم) از آب مقطر پر نمایید و پس از پایان کار برای جلوگیری از انتقال بیماری ها ، شیشه را تخلیه و تمیز کنید.
- (۳) یک سر لوله پلاستیکی را به شیشه آب مقطر و سر دیگر را به سوند بینی یا ماسک متصل نمایید. (از لوله تغذیه با شیلنگ بیش از یک و نیم متر استفاده نکنید).
- (۴) برای تست برقراری جریان اکسیژن، پیچ کنترل آن را با توجه به فلومتر در حدود ۳ لیتر در دقیقه باز کنید و سپس سر سوند را در لیوان آب قرار دهید. اگر حباب ایجاد شد ، جریان برقرار است. حالا پیچ را ببندید.
- (۵) ماسک را روی دهان و بینی فرد گذاشته و بند کشی ماسک را پشت سر ثابت کنید، به طوری که از اطراف ماسک اکسیژن خارج نشود. حال پیچ کنترل جریان اکسیژن را باز کنید و طبق دستور پزشک تنظیم نمایید تا جریان برقرار شود.
- (۶) پس از اتمام کار ، پیچ کنترل جریان و شیر اصلی کپسول را ببندید و کپسول را در محل مناسبی قرار دهید. همچنین لوله پلاستیکی، ماسک و سوند را دور بریزید.

تجهیزات پزشکی مرکز بهداشت زرنند